


# Alexis® O

## ウインドプロテクター/リトラクター セットアップガイド


標準的な手順に従って手術部位を準備し、皮膚が清潔で乾燥していることを確認してください。

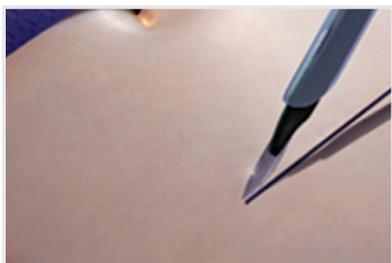


- 1** 切開ラインを書き、ラインに沿って切開します。




- 2** Alexis O ウインドプロテクター/リトラクターの緑色のインナーリングを切開部に挿入します。

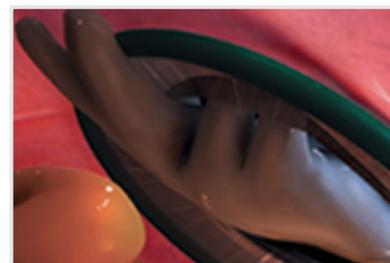

- 3** 開創する前に、腸管及び組織がインナーリングと腹壁の間に挟まれていないかインナーリング周辺を指先でよく確認します。

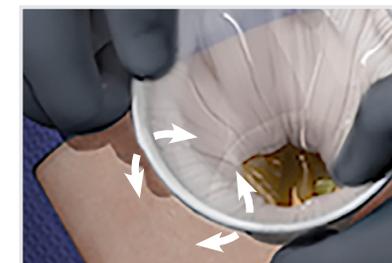


- 4** 白色のアウターリングを10時と2時の角度で握り、緑色のインナーリングが腹膜層に密着するまでゆっくり巻きます。適切な開創が得られるまで内側または外側にアウターリングを回転します。

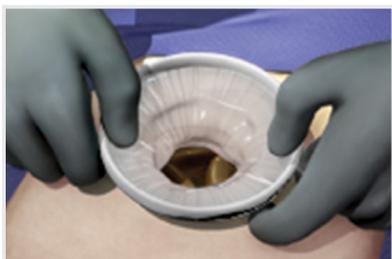

- 5** インナーリング周辺を再度指先で確認し腸管及び組織がインナーリングと腹壁の間に挟まらないようにします。(図3を参照)



- 6** 十分な開創が得られましたら、保護された創部より手術を行います。

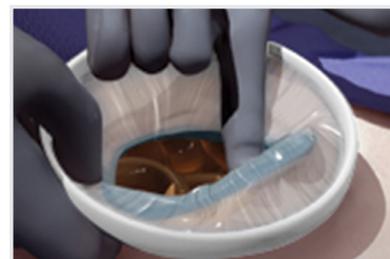

- 7** 緑色のインナーリングを図の要領で腹腔から抜去し、Alexis O ウインドプロテクター/リトラクターを取り外します。

販売名: Alexis・ウインドプロテクター/リトラクター  
医療機器製造販売認証番号: 302ACBZX00028000

★単回使用  
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2022 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.  
Applied Medical、Appliedメディカルのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で次の国で登録されています。オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

11/2022 323421-JA-D

■製造販売元  
Applied Medical Japan株式会社  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8  
KANDA SQUARE GATE 6階  
www.appliedmedical.co.jp

詳しくは  
<https://appliedmedical.co.jp/Products/Alexis>をご覧ください。

■製造業者  
アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国  
www.appliedmedical.com

**Applied**  
Medical 